


KD-738

EASY LIFE




قرار دادن باتریها

1. درب محافظ باتریها را باز نمایید.
 2. عدد باتری سایز AAA را با توجه به قطبهای مشخص شده در داخل دستگاه قرار دهید.
 3. درب محافظ را ببندید.
- هر زمان که دستگاه علامت  را نمایش می دهد ، را نمایان نمود می بایست باتریها عوض شوند .
اگر از دستگاه برای مدت بیش از یک ماه استفاده نمی نمائید
باتریها را از دستگاه خارج کنید.


راهنمای فارسی دستگاه فشار سنج دیجیتال مچی مدل KD-738

قسمتهای مختلف دستگاه

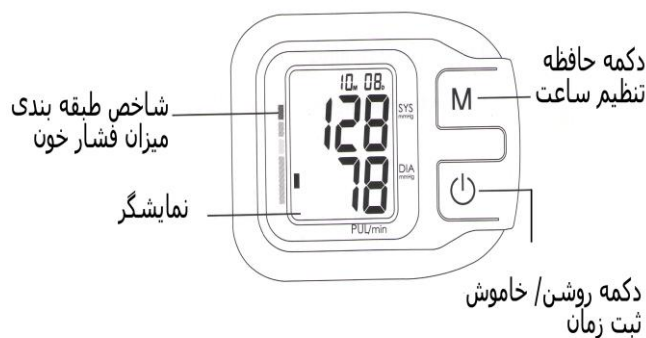

نحوه تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه

1. هر زمان که شما دستگاه را خاموش می نمائید یا باتریها را داخل آن قرار می دهید وارد مد ساعت می شوید و دستگاه ساعت و تاریخ را روی صفحه نشان می دهد.
2. در این حالت با فشار دادن همزمان دکمه "M" و "U" برای مدت 2 ثانیه نمایشگر ماه شروع به چشمک زدن می نماید با فشار دادن "M" می توانید ماه مورد نظر را انتخاب نموده و با فشار دادن دکمه "U" وارد تنظیم روز - ساعت و دقیقه می شوید.
و در هر حالت دکمه "M" عدد مورد نظر را انتخاب می نمائید.
3. پس از کلیه تنظیمات با فشار دادن دکمه "U" دستگاه را خاموش و تغییرات ذخیره می شوند.
4. بعد از هر بار تعویض باتریها می بایست تنظیمات را از ابتدا انجام دهید.

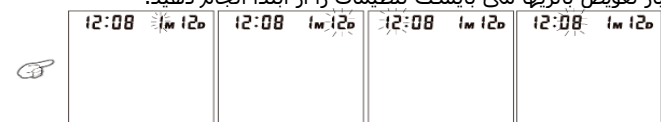

نحوه بستن کاف

1. کاف را طبق شکل به دور مچ دست ببندید به شکلی که لبه کاف از محل اتصال دست به مچ در حدود 1-2 سانتی متر فاصله داشته باشد.
2. کاف نباید خیلی محکم و یا خیلی شل بسته شود.



مشخصات دستگاه

1. مدل : KD-738
2. سایز : 83×64×28 میلی متر
3. سایز کاف : 300×70 سانتی متر
4. وزن بدون باتری : 110 گرم
5. نحوه اندازه گیری : oscillometric - اتوماتیک
6. تعداد حافظه : 60 مورد با درج ساعت و تاریخ
7. دقت اندازه گیری : ±3 mm hg
8. باتری : 2 عدد، سایز AAA آلکالاین

موارد مهم قبل از اندازه گیری

1. 30 دقیقه قبل از اندازه گیری از خوردن - آشامیدن ویا ورزش کردن و سیگار کشیدن خودداری نمائید.
2. قبل از اندازه گیری در حدود 5 دقیقه استراحت نمائید.
3. در حین اندازه گیری از حرف زدن و تکان خوردن ویا جا بجا کردن دستگاه خودداری نمائید.
4. کاف می بایست در راستای قلب قرار گیرد.
5. لطفاً کاف را روی دست چپ خود ببندید .
6. این دستگاه جهت استفاده بزرگسالان تهیه شده است.
7. دستگاه را از میدان مغناطیسی قوی مثل موبایل و مایکروفر دور نگهدارید.
8. توصیه می شود افرادی که دارای آریتمی قلبی هستند از دستگاه دیجیتال استفاده ننمایند.
9. اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده نمی کنید باتریهای آنرا خارج نمائید.

نحوه نشستن و اندازه گیری

1. آرنج را روی میز قرار داده و کف دست خود را به سمت بالا نگهدارید.
2. کمر خود را صاف نگه داشته از خم شدن به جلو و عقب خودداری نمائید.
3. دستگاه را در راستای قلب خود قرار دهید.
4. جهت جلوگیری از تکان خوردن دست در هنگام اندازه گیری می توانید جعبه پلاستیکی دستگاه را زیر مچ دست خود قرار دهید



اندازه گیری فشار خون


1. بعد از بستن کاف دکمه "U" را فشار دهید صدای بوق از دستگاه شنیده شده و تمام علامتها ی صفحه دستگاه نمایان می شوند.

اگر در حافظه دستگاه عددی وجود داشته باشد دستگاه مقدار آخرین اندازه گیری را نشان می دهد.

2. سپس دستگاه علامت صفر را روی صفحه نشان می دهد. و دستگاه شروع به باد نمودن کاف می نماید و پس از چند لحظه نتایج روی صفحه نشان داده می شود.

3. دستگاه پس از یک دقیقه به طور خود کار خاموش می گردد.

و یا می توان با فشار دادن دکمه "U" دستگاه را خاموش نمود.

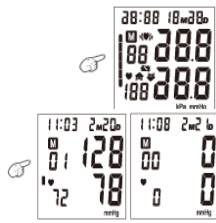

رفع اشکالات (1)

مشکل	دلیل وقوع	راه حل
صفحه نمایشگر پیام را نشان می دهد.	ضعیف بودن باتری	باتریها را عوض نمایید
نمایشگر پیام EE را نشان می دهد.	در زمان اندازه گیری فشار سنج و یا دست حرکت داده شده است.	دوباره آزمایش را تکرار کنید و از حرکت دادن دستگاه و دست خودداری نمایید.
	کاف بخوبی باد نمی شود و یا هوا در حین اندازه گیری از دستگاه خارج می شود	لوله های ارتباطی را چک و محکم کنید.
	نمایش ضربان غیر متعارف (آرینمی)	افراد دارای آرینمی می بایست دوباره آزمایش را انجام دهند. برای افرادی که دچار آرینمی هستند توصیه می شود از دستگاه دیجیتال استفاده نمایند.

نمایش نتایج ذخیره شده


1. بعد از انجام هر آزمایش و دیدن پاسخ با فشار دادن دکمه "MEM"

می توانید نتایج ذخیره شده را در حافظه مشاهده کنید

2. در مد ساعت با فشار دادن دکمه "MEM" می توانید نتایج ذخیره شده را مشاهده کنید. اگر در حافظه نتیجه ای وجود نداشته باشد شکل زیر را مشاهده می کنید. با فشار دادن دکمه

"U" یا "MEM" دستگاه خاموش می شود

3.

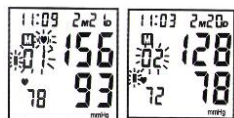

رفع اشکالات (2)

مشکل	دلیل وقوع	راه حل
صفحه نمایشگر پیام EE را نشان می دهد.	کاف فشار سنج بخوبی باد نمی شود. کاف بخوبی بسته نشده یا لوله ارتباطی خم شده است.	کاف و لوله را بررسی و مجدداً آزمایش نمایید.
نتایج بدست آمده غیر نرمال هستند.	کاف در جای مناسب و یا بطور صحیح بسته نشده است.	کاف را درست بسته و مجدداً آزمایش کنید
	در زمان اندازه گیری نحوه نشستن صحیح نبوده است.	به قسمت نحوه نشستن مراجعه کرده و دوباره اندازه گیری کنید.
	فرد در هنگام اندازه گیری صحبت و یا حرکت نموده است.	آزمایش را پس از استراحت دوباره تکرار کنید.
در زمانیکه دکمه را فشار داده و یا باتریها را تعویض نموده اید. هیچ عملیاتی انجام نمی شود.	نحوه انجام کار درست نبوده و یا در معرض میدان مغناطیسی قوی قرار گرفته اید.	باتریها را خارج نموده و پس از 5 دقیقه دوباره باتریها را وارد نمایید.

نحوه حذف نتایج ذخیره شده

در زمانیکه دستگاه در حال نشان دادن نتایج اندازه گیری شده

قبلی می باشد با نگهداشتن دکمه "M" برای مدت 3 ثانیه پس از شنیدن صدای بوق کل نتایج ذخیره شده پاک خواهند شد.

با فشار دادن دکمه "M" یا "U" دستگاه خاموش می گردد.




نگهداری

1. دستگاه را به زمین نیندازید.
2. از قرار دادن دستگاه در دمای بالا و یا محل های مرطوب خودداری نمائید.
3. هیچگاه سعی ننمائید دستگاه را باز کنید. اگر برای مدتی از دستگاه استفاده نمی کنید باتریهای آنرا خارج کنید.

طبقه بندی فشار اندازه گیری شده	فشار بالا	فشار پایین	جهانی سازمان بهداشت جهانی رنگ
ایده آل	<120	<80	سبز
نرمال	129-120	40-80	سبز
بالتر از حد نرمال	139-130	89-85	سبز
مرحله 1 فشار خون بالا	159-140	99-90	زرد
مرحله 2 فشار خون بالا	179-160	109-100	نارنجی
مرحله 3 فشار خون بالا	>180	>110	قرمز

تحلیل فشار خون اندازه گیری شده با توجه به استاندارد سازمان بهداشت جهانی
دستگاهی که در اختیار شما قرار دارد فشار خون شما را بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی طبقه بندی می نماید. این طبقه بندی براساس جدول ذیل و رنگی که نمایشگر صفحه بر روی آن می ایستد قابل تحلیل می باشد.

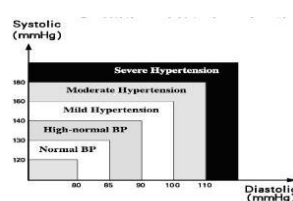

شرکت کامیاب طب مداوا

نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش محصولات Easy life در ایران

تلفن: 66977656

این دستگاه دارای کلیه تأییدیه های بین المللی

ISO13485-CE0197

اروپا و مجوز وزارت بهداشت ایران می باشد.

دستگاه دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش است.